


# ARISTA™ AH Emilebilir Hemostatik Parçacıklar

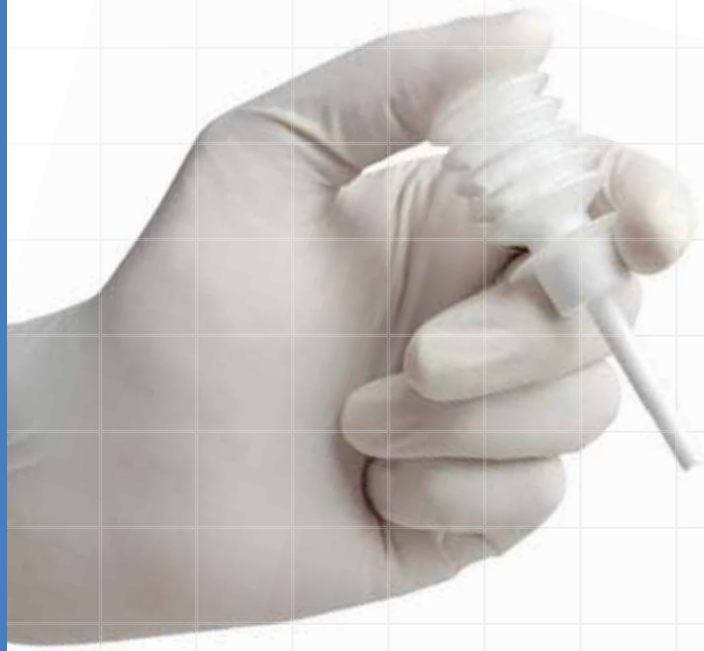

## Sipariş Bilgisi

ARISTA™ AH Emilebilir Hemostatik Parçacıklar

Katalog Numarası	Miktarı	Tanımı
SM0005	5/cs.	ARISTA™ AH 1 g Kutu (Emilebilir Hemostatik Parçacıklar)
SM0002	5/cs.	ARISTA™ AH 3 g Kutu (Emilebilir Hemostatik Parçacıklar)
SM0007	5/cs.	ARISTA™ AH 5 g Kutu (Emilebilir Hemostatik Parçacıklar)
AM0004	5/cs.	ARISTA™ AH FlexiTip™ Aplikatör 14 cm (iki adet aplikatör içerir)
AM0005	10/cs.	ARISTA™ AH FlexiTip™ XL Aplikatör 38 cm
		ENT Kit (2 g HEMADERM™ ve iki adet FLEXITIP™ aplikatör içerir)

**Bard France S.A.S**  
(Fransa, Kuzey Afrika)  
FRANSA  
Tel: + 33 1 39 30 58 58  
Faks: + 33 1 39 30 58 59  
Bard de España S.A.  
(İspanya, Portekiz)

**İSPANYA**  
Tel: + 34 93 253 7800  
Faks: + 34 93 205 8200  
Bard S.p.A  
(İtalya, Doğu Akdeniz, Orta Doğu)

**İTALYA**  
Tel: + 39 06 52 49 31  
Faks: + 39 06 529 58 52  
Bard Medica S.A.

**İSVİÇRE**  
Tel: + 41 44 722 5360  
Faks: + 41 44 722 5370  
Bard Limited  
(BK, İrlanda)

**BİRLEŞİK KRALLIK**  
Tel: + 44 1293 529555  
Faks: + 44 1293 552428  
customer.services@crbard.com  
Bard Çek Cumhuriyeti s.r.o.

**ÇEK CUMHURİYETİ**  
Tel: + 420 242 408 630  
Faks: + 420 242 410 185  
Bard Benelux N.V.

**BELÇİKA**  
Tel: + 32 14 28 69 52  
Faks: + 32 14 28 69 66  
custservicebelgium@crbard.com  
C. R. Bard Netherlands Sales B.V.

**HOLLANDA**  
Tel: + 31 88 01 22 500  
Faks: + 31 30 01 22 501  
custservicenederland@crbard.com  
Bard Poland Sp.z.o.o.

**POLONYA**  
Tel: + 48 22 321 09 30  
Ücretsiz: 0800 494900  
Faks: + 48 22 321 09 38  
Ücretsiz: 0800 494901  
Bard Hellas SA

**YUNANİSTAN**  
Tel: + 30 210 96 90 780 1  
Faks: + 30 210 96 28 810  
C. R. Bard GmbH

**ALMANYA**  
Tel: + 49 721 9445 124  
Faks: + 49 721 9445 100  
Bard Medical Systems  
Norden AB

**İSVEÇ**  
Tel: + 46 42 386 000  
Faks: + 46 42 386 010  
**NORVEÇ**  
Tel: + 47 815 00 266  
Faks: + 47 815 00 299

**DANİMARKA**  
Tel: + 45 49 26 20 08  
Faks: + 45 49 26 20 09

**FİNLANDİYA**  
Tel: + 358 9 347 30 53  
Faks: + 358 9 346 25 76  
Bard Medica S.A.

**AVUSTURYA**  
Tel: + 43 1 49 49 130  
Faks: + 43 1 49 49 130 30  
Bard Medical SA (Pty) Ltd.

**GÜNEY AFRİKA**  
Tel: + 27 115 24 9900  
Faks: + 27 86 537 7250

**Bard İstanbul Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.**  
info-tr@crbard.com

## ARISTA™ AH

Emilebilir Hemostatik Parçacıklar

eksiksiz Biyocerrahi ürünleri ailesinin sadece bir üyesidir:

### Biyocerrahi Ürünleri

ARISTA™ AH Emilebilir Hemostatik Parçacıklar  
AVITENE™ Mikro fibriller Kollajen Hemostat  
PROGEL PLATINUM™ Cerrahi Yapıştırıcı

### BARD® Cerrahi Hizmetler

#### Klinik Eğitim Programları

Cerrahi teknikler konusunda eğitim ve ameliyatları canlı izleme olanağı sağlayan uluslararası eğitim merkezleri, BARD® fitik onarım ürünlerinin çoğu için sunulmaktadır. Ayrıntılı bilgi için temsilcinize danışınız.

**BARD Didact™**  
Where Knowledge Leads™

www.davol.com


## ARISTA™ AH

Emilebilir Hemostatik Parçacıklar

Basit. Güvenli. Etkili.

## BARD®'dan yeni nesil hemostaz

**BARD**  
DAVOL INC.

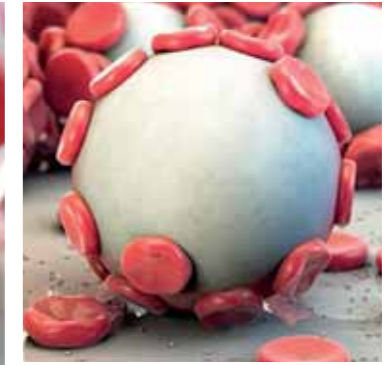

Endikasyonlar, kontrendikasyonlar, riskleri uyarılar, önlemler ve kullanım talimatları için ürün etiketleri ve prospektüslere başvurunuz.

Bard, Bard Didact, Davol, Arista, Avitene, EndoAvitene, Progel Platinum, SyringeAvitene, UltraFoam ve Where Knowledge Leads, C.R. Bard, Inc. veya bir iştirakinin ticari markası ve/veya tescilli ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir. (c) Copyright 2014, C.R. Bard, Inc. Tüm hakları saklıdır. 0414/4477 LIT-0207 REV A 06/14

**BARD**  
DAVOL INC.

**BIYOCERRAHİ**  
Kanıtlanmış bilgi. Mükemmel sonuçlar.

### Cerrahi Tekniğinizi ARISTA™ AH ile Tamamlayın: Son nesil hemostat

ARISTA™ AH, kılcal damar, venöz veya arteriyolar kanamalarda cerrahlar tarafından primer kapama metodlarına ek olarak başvurulmaktadır. Bu bitkisel ve emilebilir hemostatik toz, pıhtılaşma sürecini hızlandırır ve dakikalar içinde etkili bir biçimde hemostasi gerçekleştirir<sup>1</sup>.

#### Basit



- Karıştırma ve soğutma yok.
- Raf ömrü 5 yıldır ve istenildiğinde kullanıma hazırdır.
- Kapağı basitçe çıkarın ve tozu kanayan bölgeye direk olarak uygulayın<sup>2</sup>.

#### Güvenli

- Artılmış bitki nişastasından sentezlenmiştir.
- Trombin içermez, biyoyumludur ve pirojenik değildir.
- Amilaz tarafından genellikle 24-48 saat<sup>3</sup> içerisinde emilir ve temizlenir.


#### Etkili

- Pıhtılaşma süreci, hastanın koagülasyon durumundan bağımsız olarak, yaraya temas ile başlar<sup>4</sup>.
- Dakikalar içerisinde pıhtılaşma tamamlanır<sup>1</sup>.
- Pürüzlü ve ulaşılması zor yüzeylerde geniş alan kaplaması sağlar.

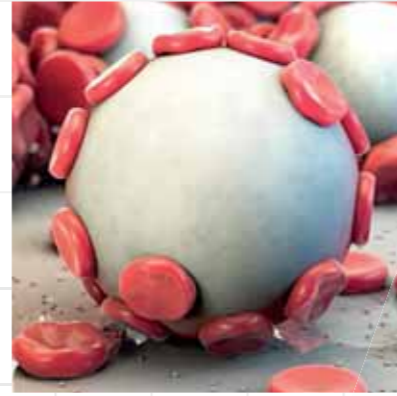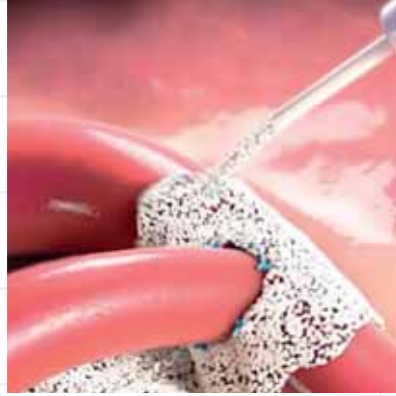

### Tescilli MPH™ Teknolojisi: Hemostazda Benzersiz Yaklaşım

ARISTA™ AH, gücünü MPH™ (Microporous Polysaccharide Hemospheres) Teknolojisinden alır. Kontrollü gözenek boyutuna sahip mikrogözenekli parçacıklarından oluşan küreler, moleküler boyuttaki bir elek gibi görev yapacak şekilde tasarlanmıştır. Güçlü ozmotik etkisi ile kanı dehidre eder, jelleştirir ve doğal pıhtılaşma sürecini hızlandırır.

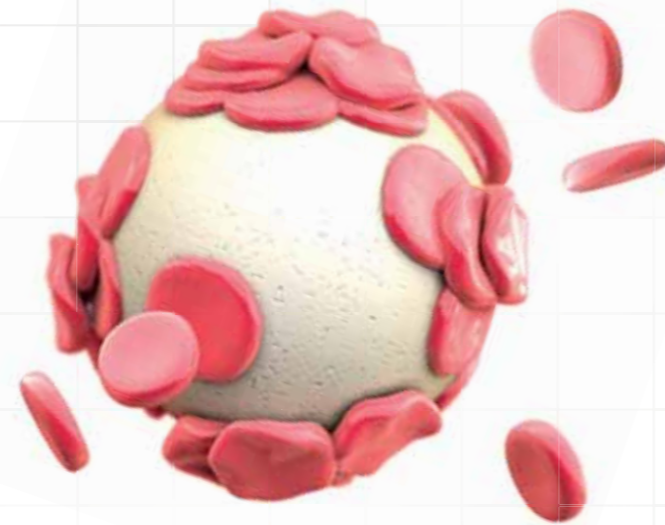

### Dakikalar içerisinde Hemostaz. Saatler içerisinde Reabsorpsiyon.

ARISTA™ AH, kan ile temas ederek, pıhtılaşma sürecini başlatır. MPH™ parçacıkları, kandaki katı yapıları, trombosit, alyuvar ve kan proteinleri gibi, bir araya toplayarak jel yapıda bir matris oluşturur. Kan kaybına karşı bir bariyer oluşturarak, hastanın koagülasyon durumundan bağımsız olarak, normal pıhtılaşma işlemini artırır<sup>4</sup>. Diğer ürünlerden farklı olarak, ARISTA™ AH, uygulandıktan sonraki 24-48 saatler içerisinde kolayca emilir.

### Birçok Cerrahi Alanda ve Prosedür Tipinde Kanıtlanmış Güven ve Etkinlik

#### Örnekler şu şekildedir:

- Kardiyotorasik ve Kardiyovasküler
- Vasküler
- Jinekolojik
- Ürolojik
- Ortopedik Cerrahi
- Genel Cerrahi
- Plastik Cerrahi
- KBB Cerrahisi

ARISTA™ AH'nın, nörolojik ve oftalmik cerrahi prosedürlerde kullanımı, onaylanmış indikasyonuna dahil değildir.



### FlexiTip™ Taşıyıcı Sistem: Tekniğinize Esneklik Katın

ARISTA™ AH, FlexiTip™ sprey aplikatörü sayesinde hızlı ve basit olarak istenilen bölgeye direkt olarak uygulanır. Taşıyıcı sistem, uzun ve esnek tüpe ve hafif bir plastik donanıma sahiptir. Basit ve tek-kullanımlık FlexiTip™ ve FlexiTip™ XL uzatılmış aplikatör uçları sayesinde, ARISTA™ AH hemostatik toz titizlikle ve doğru bir şekilde taşınır.



**REMOVE (Uzaklaştırmak):**  
Bütün fazla kan uzaklaştırılır



**APPLY (Uygula):**  
Kanama bölgesine ARISTA™ AH uygulanır



**PRESSURE (Basınç):**  
Hemostaz sağlanana kadar yara üzerine uygun basınç uygulanır.



**IRRIGATE (Yıkama):**  
Uygulama bölgesi yıkılarak fazla ARISTA™ AH uzaklaştırılır



**DONE (Bitirme):**  
Hemostaz, hızlıca, güvenli bir şekilde ve etkili olarak sağlanır

<sup>1</sup> ARISTA™ AH PMA P050038 Klinik çalışması

<sup>2</sup> Detaylı uygulama talimatları için Kullanma Kılavuzuna bakınız.

<sup>3</sup> ARISTA™ AH'nin, 0-10 ay arası yeni doğanlardaki emilim oranı, bu popülasyonda bildirilen düşük amilaz aktivitesinden dolayı, 48 saatten fazla olabilir.

<sup>4</sup> ARISTA™ AH Kullanma Kılavuzu



### FDA-Onaylı Hücre Kurtarıcı Hemostat

ARISTA™ AH, FDA-onaylı ve hücre kurtarmaya uyumlu bir hemostattır. ARISTA™ AH, analog kan kurtarma devresi ile birlikte kullanıldığında, 40µ kardiyotomi rezervuarı, hücre yıkama ve 40µ transfüzyon filtresi de kullanmak zorunludur.